






Information till djurägare Carpal Grad 3 med Tass Ortos

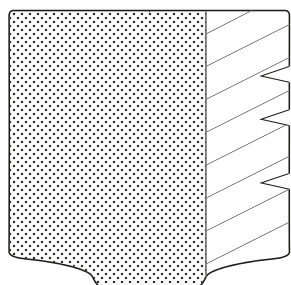

Neopren-wrap med polstring

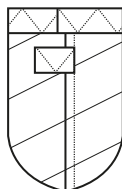

Neopren-wrap
för tass

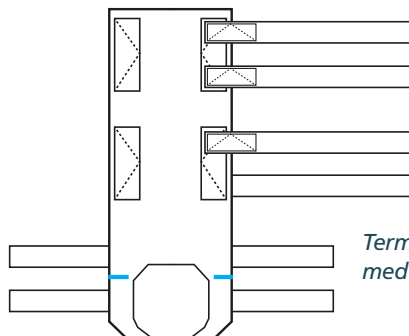

Termoplastisk ortos
med kardborrband

Om Ortosen

Det här är en rigid ortos för carpal och tass. Ortosen består av en mjuk inre del med polstring och en yttre ortos av rigid termoplast. Din veterinär kommer att ha format ortosen till konturen av ditt djurs nedre framben.


Att ta av och på ortosen

Ortosen kommer behöva tas av ibland, för att kunna kontrollera djurets ben.

Ett bra tips när man öppnar ortosen är att lossa kardborrbanden ett i taget och fästa dem i sig själv. Försätt sedan med att öppna upp innerdelen av ortosen och lyft ut benet ur ortosen.

Om ortosen är avsedd för att användas dygnet runt, kan kliniken ha lindat benet och tassens med polstervadd. För att se en instruktionsvideo om hur man lindar benet, scanna QR-koden högst upp på sidan.

När du efter genomförd kontroll placerar benet tillbaka i ortosen, se alltid till att den bredaste delen av carpalleden placeras i ortosens bredaste del. Observera också att området bakom carpalleden i ortosen har ett litet extra utrymme. Denna fördjupning är till för att avlasta och förhindra skav. Tryck inte carpalleden ända in i fördjupningen utan lämna lite utrymme för att undvika skav.

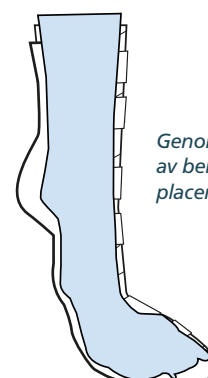

Genomskärning
av benet korrekt
placerat i ortosen.

Se också till att det är lite luft mellan neopren-skön och den rigida yttre ortosens sko. Det vill säga - djurets tår ska inte ligga dikt an mot ytterskons innersida.

Fäst neopren-wrapen tight. Dra sedan åt och fäst kardborrbanden på den yttre ortosen. Kardborrbanden ska sitta såpass hårt att man kan få in en fingertopp men inte hela fingret.

Skötselråd

- Avlägsna päls och smuts från kardborrbanden för bästa möjliga fästegenskaper
- Undvik att exponera ortosen för extrema temperaturer, som t.ex. hårtorkar och element
- Om polstringen inne i den inre ortosdelen känns fuktig, avlägsna den och fäst ersättningspolstringen i dess ställe. Polstringen kan tvättas i 60 °C, helst i tvättpåse
- För att tvätta den inre ortosdelen, använd mild tvättmedel, handtvätt, max 30 °C, i tvättpåse
- Den yttre, hårda delen av ortosen kan inte tvättas i maskin. Rengör denna manuellt vid behov, max 30 °C.

Allmänna råd för djurskötsel vid användning av ortosen

Följ alltid de råd och instruktioner som din veterinär givit angående ditt djurs specifika skada och behandling. Nedan följer några allmänna råd som vi ger vid användande av Grad 3 med tass-ortos.

- Under de första tre dygnen med ortosen, undersök benet 2-4 gånger per dag, för att kunna se tåsvullnad, eventuella skav eller värmeökning
- Kontakta din veterinär om vätskande sår, odörer eller andra problem uppstår. Det är alltid bättre att behandla komplikationer om de upptäcks tidigt, så meddela din klinik om du ser onormala hudirritationer, helst innan det utvecklas till ett sår
- Ortosen påverkar alltid gången. Ser det obekvämt ut för djuret? Om djuret slickar, biter eller inte använder benet, vänligen kontakta din veterinär. Var uppmärksam på beteendeförändringar eller om djuret inte vill äta. Kontakta din veterinär om du har frågor.

För frågor gällande produkten, kontakta oss på:

Tel. +46 (0)31-21 41 28

Email: info@scandiop.se



Scandiop